



- ◆気管挿管、挿入の補助器具
- ◆アルミニウム芯、プラスチックカバー
- ◆プラスチック被覆で先端まで包まる
- ◆滑らか表面
- ◆ラテックスフリー
- ◆EOG滅菌、単回使用
- ◆1本／袋



使用例

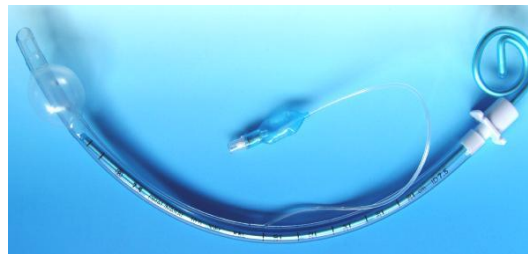


型番:Ki-001スタイレット(アダプター有り)

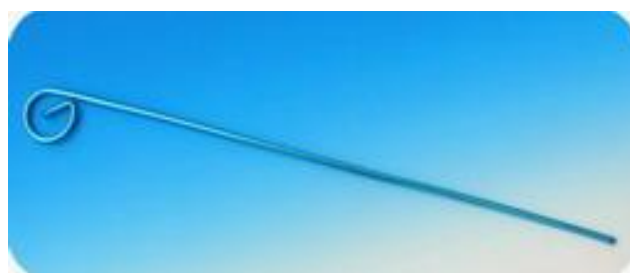


型番:Ki-001スタイレット(アダプター無し)

## 【挿管前の準備】

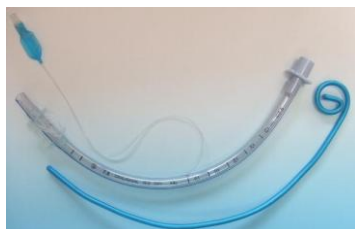


- ・挿管前にスタイレットを気管内チューブに挿入する。
- ・挿入前に気管チューブの形に少しカーブをつけておくと挿管しやすい。
- ・チューブに挿入後、更に適切な形にカーブさせる。

■スタイレットが短い場合: 上部の渦巻きを伸ばして長くする。

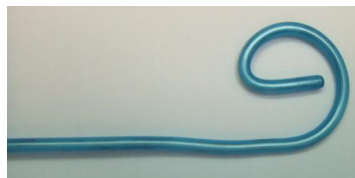

■スタイレットが長い場合: 渦巻の根元を曲げてストッパーにする

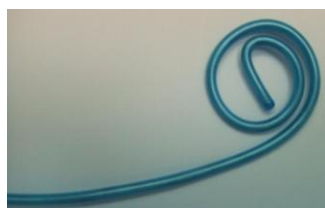

## 《 スタイレットと気管挿管のサイズ対応表 》

| スタイレットアダプター有り |                   | アダプター無し | 気管挿管    |
|---------------|-------------------|---------|---------|
| サイズ           | Fr (mm) × 長さ (mm) |         | ID(mm)  |
| XS            | 6Fr × 180         | 200     | 2.5～3.5 |
| S             | 10Fr × 240        | 280     | 4.0～6.0 |
| M             | 12Fr × 280        | 310     | 6.5～8.0 |
| L             | 14Fr × 330        | 350     | 7.0以上   |

## 《包装形態》 個別包装



1箱20本入

〈有効期間〉 製造年月より3年

輸入・販売元 第一種医療機器製造販売業  
京中貿易株式会社  
604-8371  
京都市中京区神泉苑町1-2  
Tel.075-811-0545 Fax.075-811-0544  
<http://www.kyoling.net/> office@kyoling.net

製造元 医療機器外国製造業者  
杭州京冷医療器械有限公司  
製造国 中国  
<http://www.kyoling.com/>